






BD Getting Started™

Auto Monitoreo del Azúcar en la Sangre

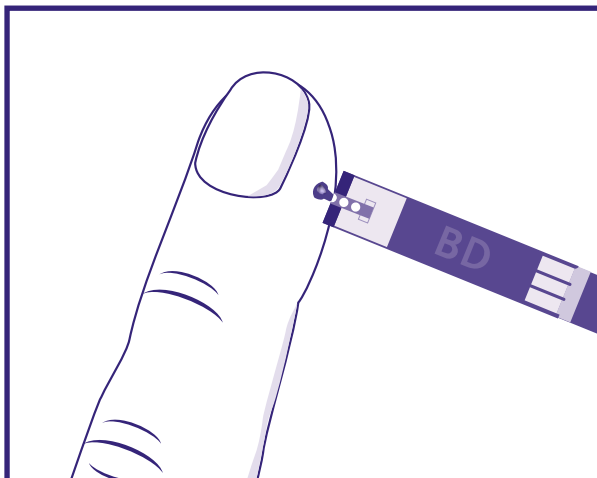


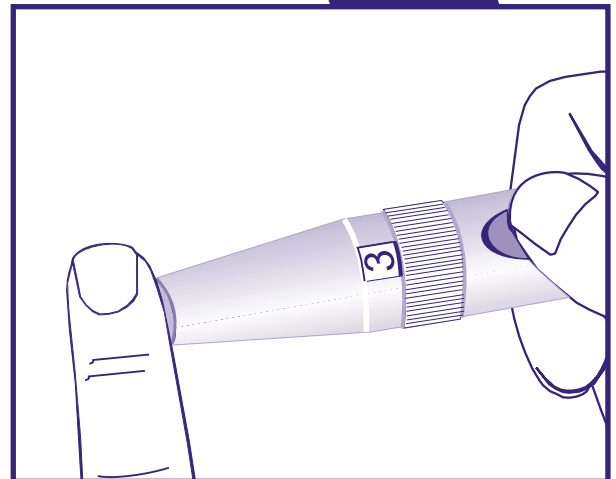

1. Obtenga los materiales

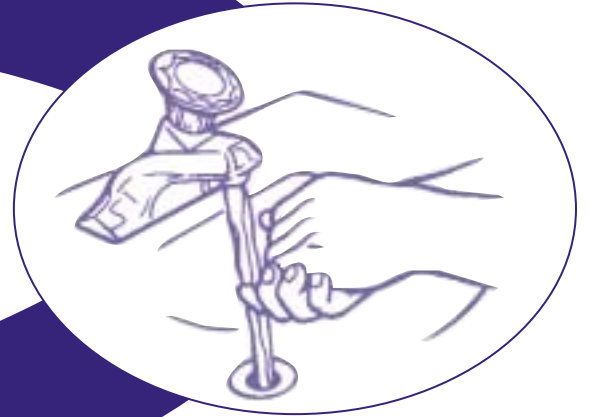

2. Lávese las manos con agua tibia

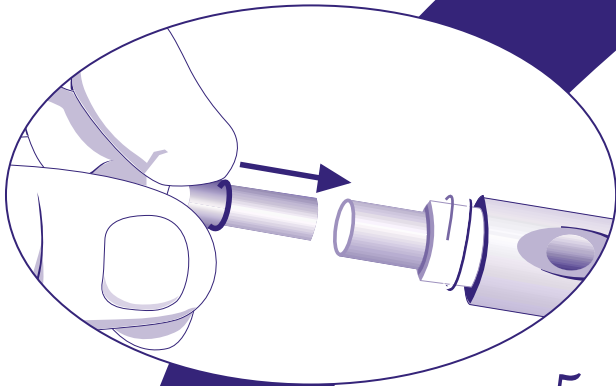


3. Coloque una lanceta BD Ultra-fine™ en el porta lanceta.




4. Limpie su dedo con una Gasa con Alcohol marca BD™. Deje que seque completamente.


5. Mantenga el Dispositivo para Lancetas de BD™ sobre el costado del dedo

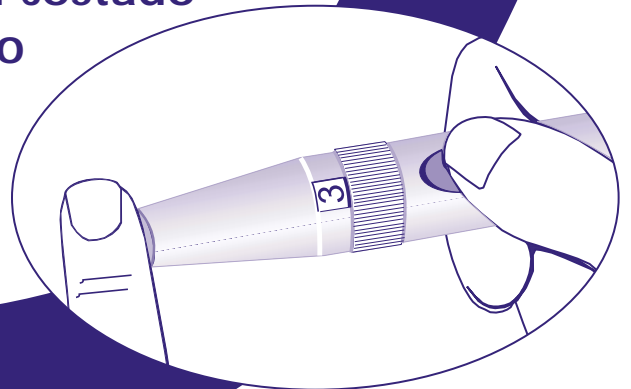


7. Apriete el dedo si necesita una gota de sangre más grande

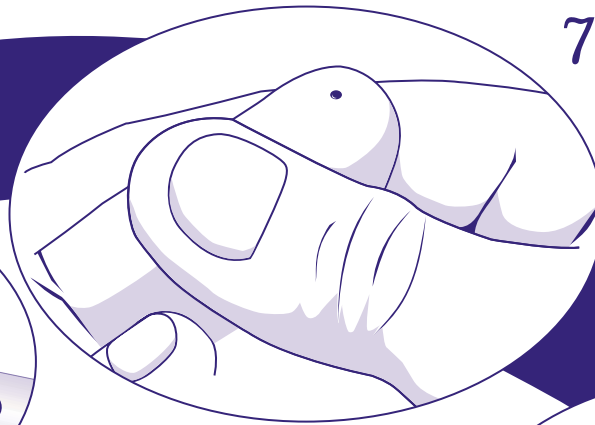

6. Presione el botón para pinchar el dedo

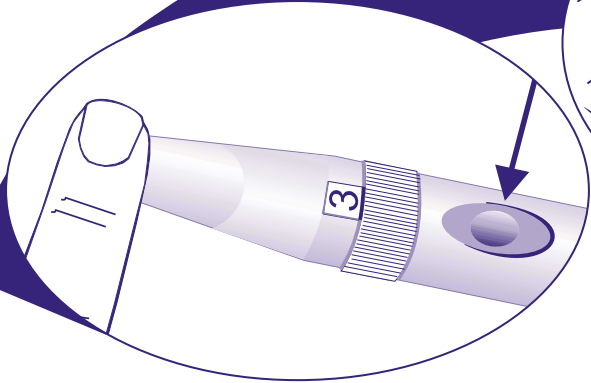

8. Aplique la gota de sangre en la tira de prueba

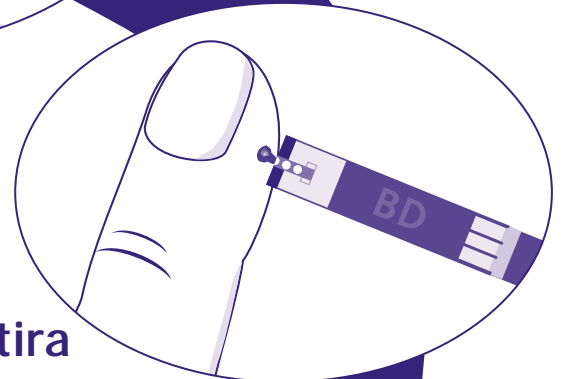


9. Siga las instrucciones de como utilizar las tiras de prueba



10. Después de cada prueba, anote en su diario, el resultado del azúcar en su sangre

Día	Desayuno		Almuerzo		Cena		A la hora de dormir	En la noche	Comentarios
	Antes	Después	Antes	Después	Antes	Después	Antes		
Fecha									
Horas									
Medicinas									
Comida									
Actividad									
Resultados									

Vea la página de atrás

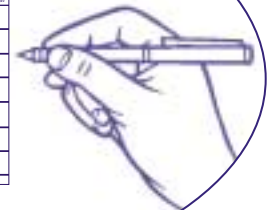

11. En su próxima visita a su médico o educador en diabetes, consúltele sus resultados.



Dosis de Insulina para:

Nombre: _____

Fecha de Hoy: _____

Mi Educador es: _____


Número telefónico: _____

Tamaño de Jeringa: BD Ultra-Fine™




3/10cc

1/2cc

1/cc

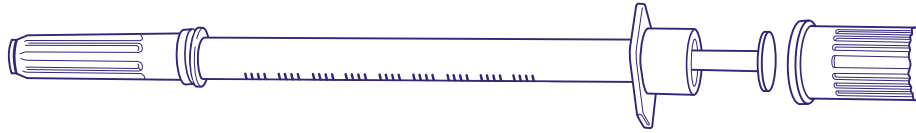


Mi insulina es: _____
(Marca)

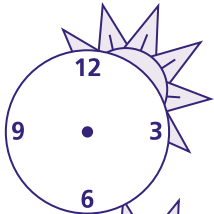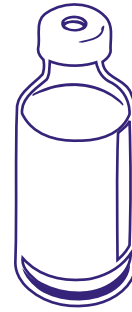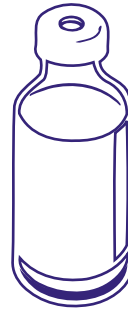

_____ A.M.

_____ unidades


_____ unidades

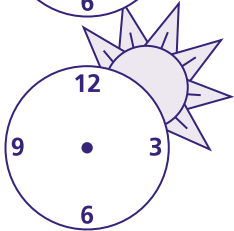

_____ P.M.

_____ unidades


_____ unidades

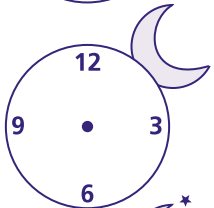

_____ P.M.

_____ unidades

_____ unidades

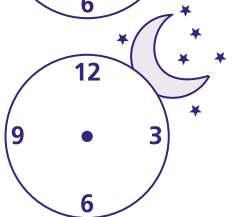

_____ P.M.

_____ unidades

_____ unidades

Llame el Servicio al Consumidor de BD al **1.888.BDCARES (1.888.232.2737)**
o visite nuestro sitio web en **www.BDdiabetes.com**.



BD Consumer Healthcare
Franklin Lakes, New Jersey 07417