

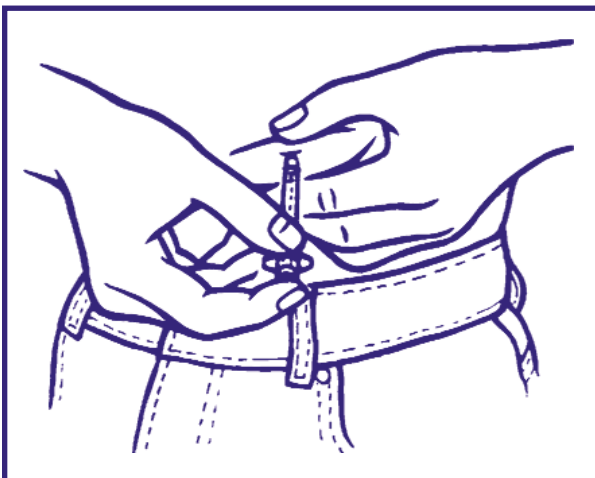


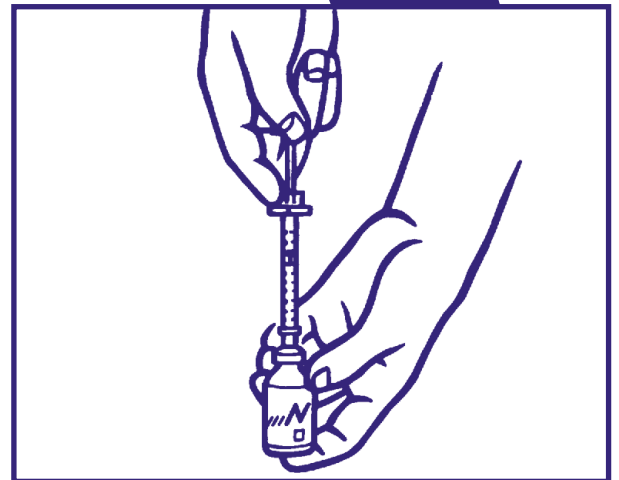


# BD Getting Started™


## Extraer e Inyectarse Insulina

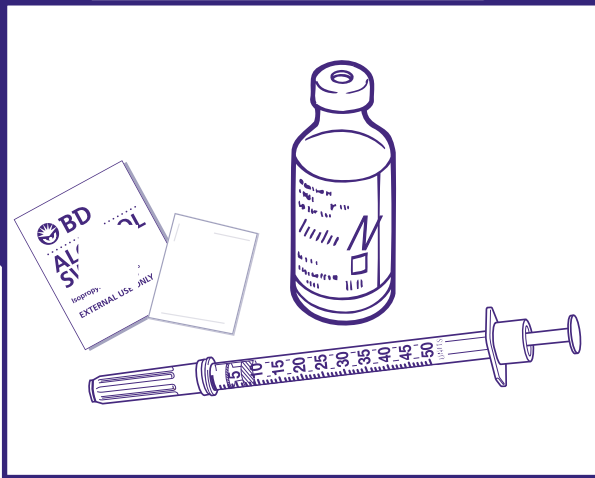


2. Lávese las manos

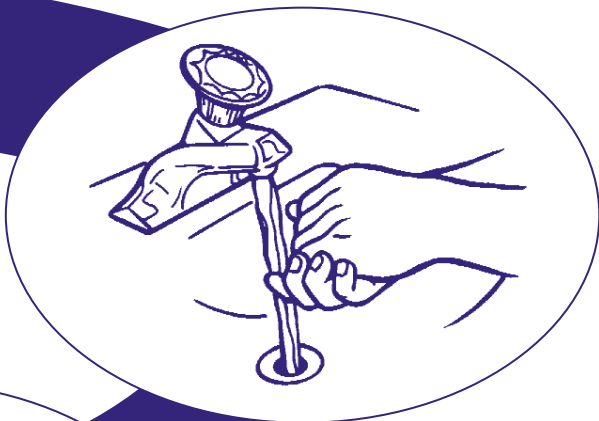

1. Obtenga los materiales

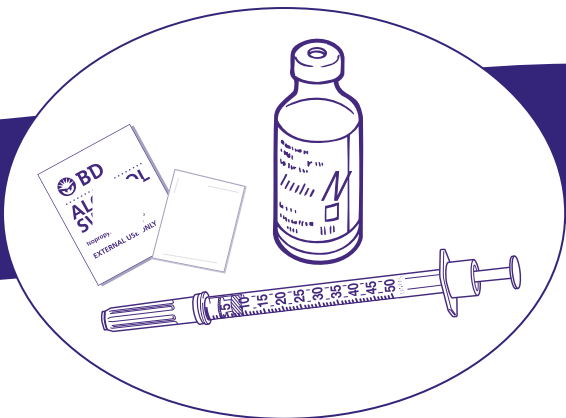

3. Gire el frasco

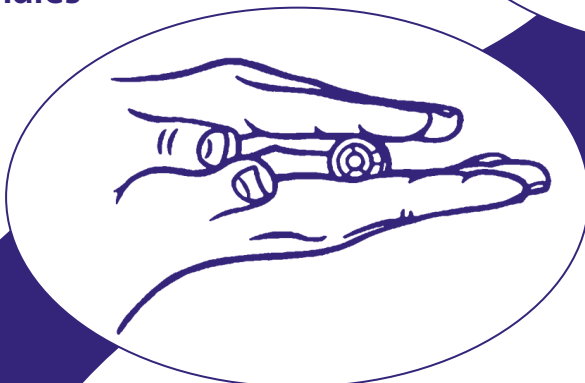

7. Empuje el émbolo hacia abajo



4. Limpie la tapa del frasco con una Gasa Con Alcohol BD™



5. Retire el émbolo hacia abajo hasta \_\_\_\_\_ unidades




6. Introduzca la aguja dentro del frasco




9. Elija el área de inyección  
Limpíela con una Gasa Con Alcohol BD™




10. Pellizque la piel • Empuje la aguja a través de la piel • Empuje el émbolo hacia adentro

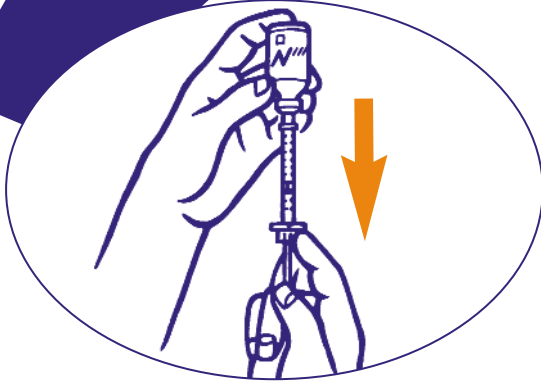


8. Retire el émbolo hacia abajo hasta \_\_\_\_\_ unidades

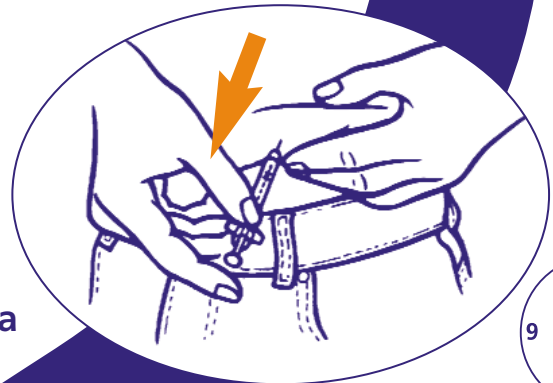


11. Retire la aguja de la piel

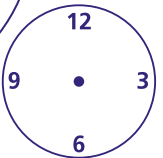

12. Deseche sus jeringas con seguridad • Verifique los reglamentos locales

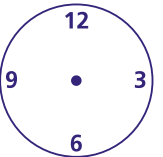

13. Coma \_\_\_\_\_ más tarde

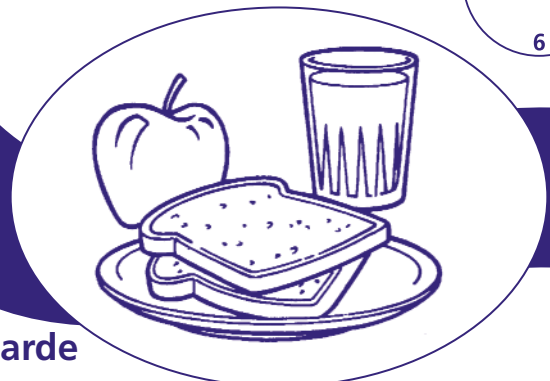


# Dosis de Insulina para:




Nombre: \_\_\_\_\_ Fecha de Hoy: \_\_\_\_\_

Mi Educador es: \_\_\_\_\_ Número telefónico: \_\_\_\_\_

Tamaño de Jeringa: BD Ultra-Fine™  3/10cc  1/2cc  1/cc

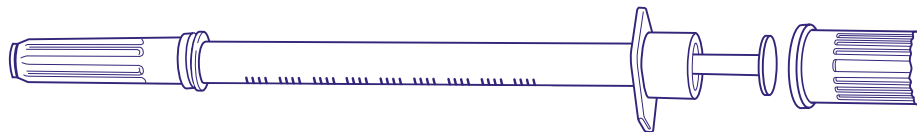


Mi insulina es: \_\_\_\_\_  
(Marca)

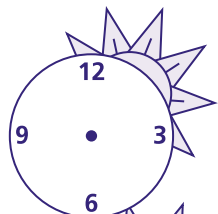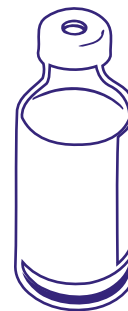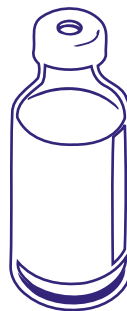

\_\_\_\_\_ A.M.

\_\_\_\_\_ unidades


\_\_\_\_\_ unidades

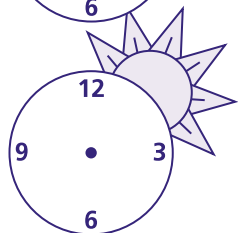

\_\_\_\_\_ P.M.

\_\_\_\_\_ unidades


\_\_\_\_\_ unidades

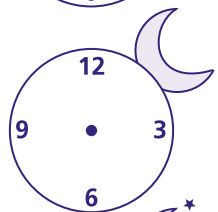

\_\_\_\_\_ P.M.

\_\_\_\_\_ unidades

\_\_\_\_\_ unidades

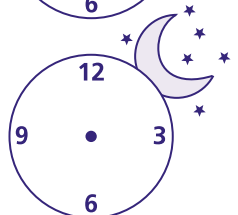

\_\_\_\_\_ P.M.

\_\_\_\_\_ unidades

\_\_\_\_\_ unidades

Llame el Servicio al Consumidor de BD al **1.888.BDCARES (1.888.232.2737)**  
o visite nuestro sitio web en **www.BDdiabetes.com**.



BD Consumer Healthcare  
Franklin Lakes, New Jersey 07417